

คำแนะนำการใช้แผ่นปิดแผล

# Mepitel One



## วิธีการใช้ Mepitel one

1. ทำความสะอาดแผลตามแนวปฏิบัติทางคลินิก ซับให้แห้ง นำผลิตภัณฑ์ออกจากซองบรรจุด้วยเทคนิคปลอดเชื้อลอกแผ่นฟิล์ม หมายเลข “1” ออก
2. วางแผ่น Mepitel one ด้านที่มีกาวซิลิโคนลงบนแผล โดยให้แผ่นปิดแผลคลุมผิวหนังรอบๆแผลอย่างน้อย 1-2 ซม. ลอกแผ่นฟิล์ม หมายเลข “2” ออกและดูแลแผ่นปิดแผลให้ปิดแนบสนิทกับผิว
3. ปิดทับแผ่น Mepitel one ด้วยแผ่นปิดแผลหรือผ้าก๊อซตามความเหมาะสม

## ข้อควรระวัง :

1. ควรตรวจประเมินว่าอาการที่แสดงการติดเชื้อของแผลตามมาตรฐานการรักษา ปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ หากแผลแสดงอาการติดเชื้อ เพื่อให้การรักษาที่เหมาะสม
2. อาจพิจารณาใช้ในผู้ป่วย Epidermolysis Bullose หลังการปรึกษาบุคลากรทางการแพทย์ที่ผ่านการอบรมมาแล้ว
3. เมื่อใช้ในแผลไฟลวกชนิด partial thickness burns ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิด rapid granulation หรือหลังจากการทำ facial resurfacing ให้หลีกเลี่ยงการลงน้ำหนักบนแผ่นปิดแผล ให้อยกหรือขยับเปลี่ยนตำแหน่งทุกๆ 2 วัน
4. เมื่อใช้ปิดในกรณีแผลมีเลือดออก หรือมีน้ำเหลืองที่มีความหนืด ควรปิดทับด้วยแผ่นดูดซับความชื้น
5. เมื่อใช้ปิดเพื่อยึด skin graft ไม่ควรเปลี่ยนก่อนวันที่ 5 หลังจากปิดไปแล้ว
6. ห้ามนำมาใช้ซ้ำ เวชภัณฑ์นี้อาจเสื่อมสภาพ และอาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายเชื้อสู่บุคคลอื่นได้ เป็นเวชภัณฑ์ที่ผ่านขบวนการปราศจากเชื้อด้วย ห้ามนำมาใช้หากบรรจุภัณฑ์ชำรุด หรือถูกเปิดออกใช้งาน ห้ามนำมาผ่านขบวนการปราศจากเชื้อซ้ำ

วิธีการเก็บรักษา : เก็บไว้ในที่แห้งอุณหภูมิต่ำกว่า 25 องศาเซลเซียส

สามารถชมวีดีโอการใช้ Mepitel one โดยการสแกน QR Code

