




ข้อแนะนำการใช้งาน

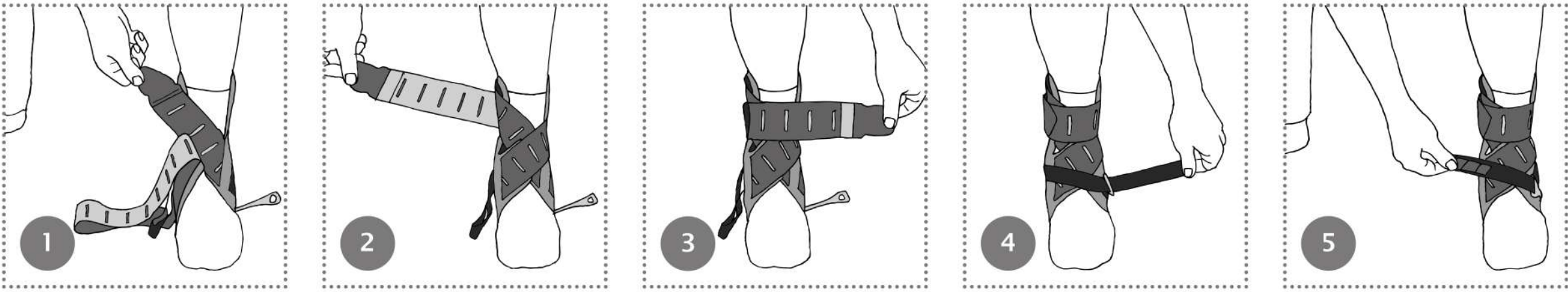


สวม VACOtalus กับถุงเท้าเสมอ ปิดสายรัดเส้นทแยงมุมสันด้านบน (ภาพที่ 1)
ใช้สายรัดที่ยึดที่ด้านในของเท้า ดึงสายรัดในแนวทแยงมุมเหนือฝ่าเท้า (ส่วนโค้งของเท้า) พันไปข้างหลังรอบขาของคุณแล้วรัดให้แน่น (ภาพที่ 2 + 3)

ปิด Talusstrap (ภาพที่ 4 + 5)

การทำงานของ สายรัด Talusstrap

การปรับตำแหน่งของสายรัด Talusstrap

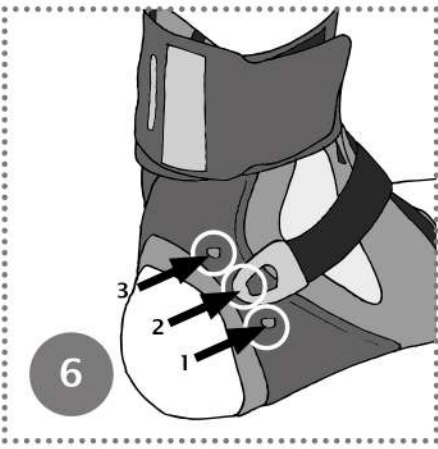

Talusstrap ทำงานอย่างไร เพื่อจำกัดการเคลื่อนไหวของกระดูกข้อเท้า สาย Talusstrap สามารถเกี่ยวเข้ากับด้านในของอุปกรณ์ในสามตำแหน่งที่แตกต่างกันหรือสามารถถอดออกได้
ตำแหน่งที่ 1: ความมั่นคงสูงสุด
ตำแหน่งที่ 2: ความมั่นคงสูง
ตำแหน่งที่ 3: ความมั่นคงระดับกลาง (ภาพที่ 6)



เปิดสาย Talusstrap ออก หมุน Talusstrap ขึ้น 90° ตอนนี้สายรัดควรสอดคล้องกับช่องเปิดตะขอสามช่อง ตอนนี้คุณสามารถปรับสาย Talusstrap ได้ (ภาพที่ 8)
ยกสาย Talusstrap และแยกออกจากอุปกรณ์ (ภาพที่ 9)



สาย Talusstrap สามารถถอดออกได้หากต้องการความมั่นคงในระดับต่ำเท่านั้น (ภาพที่ 7)



เกี่ยวสาย Talusstrap ในตำแหน่งที่ต้องการและหมุนไปข้างหน้า 90° เพื่อยึดสายรัดเข้ากับอุปกรณ์ (ภาพที่ 10)
ปิดสาย Talusstrap ให้เรียบร้อย (ภาพที่ 11)

คำแนะนำสำหรับการเลือกขนาด (วัดเทียบตามขนาดรองเท้า)

Size	Small	Standard
EUR	≤ 40	≥ 40
UK	≤ 6,5	≥ 6,5
US (M)	≤ 7,5	≥ 7,5
US (W)	≤ 8,5	≥ 8,5

หมายเหตุ : แนะนำการเลือกขนาด
เท้า < 24.5 cms เลือก small
เท้า > 24.5 cms เลือก standard

ข้อแนะนำการใช้งาน (ข้อบ่งชี้)

- อาการบาดเจ็บเฉียบพลันที่เอ็นข้อเท้า
- การดูแลภายหลังการแตกหักของข้อเท้า
- การป้องกันรอยโรคเอ็นที่ข้อเท้า
- การชะลอความไม่มั่นคงของข้อต่อข้อเท้า

ข้อห้ามใช้

- กระดูกหักที่ไม่เสถียร

คำแนะนำในการสวมใส่:

VACOtalus ควรสวมกับถุงเท้า และสวมใส่ใต้อุปกรณ์แบบปิด ผลิตภัณฑ์นี้สำหรับเท้าซ้ายหรือขวา โดยมีการระบุตัวเลือกที่ด้านในตามนั้น
ก่อนอื่น เปิดสายรัดตีนตุ๊กแกทั้งหมด วางอุปกรณ์รอบเท้าจากด้านหลัง และปิดสายรัดดังรูปคำแนะนำ

คำแนะนำในการสวมสายรัด Talusstrap

- เพื่อความมั่นคงที่มากขึ้น: เริ่มต้นด้วยการใส่ให้แน่น จากนั้นพันหลังขาอย่างหลวมๆ
- สำหรับอาการบวม/ปวด: เริ่มต้นด้วยการดึงมันอย่างหลวม ๆ เหนือหลังเท้า (ส่วนโค้งของเท้า) จากนั้นพันไว้ด้านหลังขาให้แน่น
- สำหรับเส้นรอบวงข้อมือที่ใหญ่ขึ้น: พันสายรัดเหนือข้อเท้ารอบขาโดยตรง

ข้อมูลเกี่ยวกับการดูแล / การทำความสะอาด

คุณได้รับผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นี้ในสภาพที่สมบูรณ์ที่อุณหภูมิ 30° C ด้วยซองฟอกที่มีจำหน่ายทั่วไป
การอบแห้ง: แห้งด้วยอากาศ ห้ามทำให้แห้งในเครื่องอบผ้า สามารถใช้กระดาษเปื้อกเพื่อเช็ดทำความสะอาดและผึ่งลมให้แห้ง
การฆ่าเชื้อโรค : ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นี้ไม่เหมาะสำหรับการฆ่าเชื้อหรือวิธีทำให้ปราศจากเชื้อ

การรับประกัน : เป็นไปตามข้อบังคับทางกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขทางธุรกิจของ OPED GmbH ยังมีผลบังคับใช้หากได้รับอนุญาต

ข้อมูลสำหรับผู้ป่วย : โปรดหลีกเลี่ยงการรัดสายอุปกรณ์ให้แน่นเกินไป หากคุณรู้สึกกดดัน โปรดคลายสายรัด talusstrap

เงื่อนไขการจัดเก็บ/การจัด

การเก็บรักษา: เก็บในที่แห้งและถูกสุขลักษณะและป้องกันจากแสงแดดโดยตรง

การทำจัด: โปรดทิ้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ในเศษเหลือใช้หรือขยะในครัวเรือน



OPED GmbH
Medizinpark 1
83626 Valley/Oberlaindern
Germany
Fon +49 (0) 80 24/60 81 8-210
Fax +49 (0) 80 24/60 81 8-299
mail@oped.de
www.oped.de

OPED AG
Hinterbergstrasse 26
6312 Steinhausen
Switzerland
Fon +41 (0) 41/748 53 35
contact@oped.ch
www.oped.ch

OPED UK Ltd
Unit 5
Avro Business Centre
Avro Way
Bowerhill
Melksham
SN12 6TP
United Kingdom
Phone +44 (0) 1380 722177
Fax +44 (0) 1380 710095
enquiries@oped.biz
www.oped-uk.com

OPED Australia Pty Ltd
2/97 Montague St.
North Wollongong NSW 2500
Australia
Phone +61 (0) 2 4226 5880
Fax +61 (0) 2 4226 5881
customerservice@oped.com.au
www.oped.com.au

OPED Asia-Pacific Co., Ltd.
5th Floor, No 16, Lane 148
Lide Street, Zhonghe Dist.
New Taipei City 23512
Taiwan
Phone +886 2 222 65586
Fax +886 2 222 65544
contact@oped-asia.com
www.oped.taipei



Keeps you going.