

Dermodacyn Wound Hydrogel

เดอร์โมดาซินวุ้นไฮโดรเจล



สรรพคุณ

ใช้จัดการบาดแผลที่มีเนื้อตาย
และเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับแผล

ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาบาดแผลได้ทุกประเภท และทุกระยะ เช่น แผลเบาหวาน แผลกดทับ แผลเรื้อรัง แผลที่มีเนื้อตาย และอื่นๆ

วิธีใช้

1. หลังจากทำความสะอาดบาดแผลด้วยเดอร์โมดาซินวุ้นแคร์สเปรย์แล้ว หากบาดแผลมีเนื้อตาย หรือสิ่งแปลกปลอมจำนวนมาก แผลเรื้อรัง (Chronic wound) แผลที่รักษาไม่หาย (Non-healing wound) ให้ใช้ **เดอร์โมดาซินวุ้นไฮโดรเจล** ฉีดพ่นบนบาดแผล ให้มีความหนาประมาณ 3-5 มิลลิเมตร เพื่อกำจัดเนื้อตาย และเชื้อจุลชีพ ซึ่งจะมีประสิทธิภาพในการรักษาแผลได้ยาวนาน 3 วัน (ในกรณีที่แผลสกปรก มีหนองมาก หรือแผลอักเสบมาก แนะนำให้ใช้วันละ 3 ครั้ง เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาบาดแผล)
2. เลือกว่าปิดแผลตามความเหมาะสม

การเก็บรักษา

เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง