

# Dermodacyn Wound Care Spray

## เดอร์โมดาซินวูนแคร์สเปรย์



### สรรพคุณ

สเปรย์พ่นทำความสะอาดบาดแผล กำจัดเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส และ เชื้อรา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องล้างออก ไม่แสบแผล และปลอดภัย

### ข้อบ่งใช้

ใช้รักษาบาดแผลได้ทุกประเภท และทุกระยะ เช่น แผลถลอก แผลเบาหวาน แผลหลอดเลือด แผลกดทับ และอื่นๆ

### วิธีใช้

1. ทำความสะอาดบาดแผลครั้งแรกด้วยน้ำเกลือหรือน้ำสะอาด (ในขั้นตอนนี้สามารถล้างทำความสะอาดด้วย **เดอร์โมดาซินวูนแคร์สเปรย์** ในขั้นแรกได้ทันที โดยสามารถใช้ได้ทั้งในบาดแผลโดยตรงหรือรอบแผล)
2. ในกรณีที่บาดแผลมีไบโอฟิล์ม ให้พ่นหรือเท **เดอร์โมดาซินวูนแคร์สเปรย์** ใส่ผ้าก๊อสให้อึดแล้ววางบนบาดแผลโดยตรง ทิ้งไว้ 10-15 นาที เพื่อให้สามารถกำจัดและฆ่าเชื้อในไบโอฟิล์มได้
3. เมื่อแผลสะอาดแล้ว พ่น **เดอร์โมดาซินวูนแคร์สเปรย์** ไปที่บริเวณแผลอีกครั้ง โดยไม่ต้องล้างหรือเช็ดออก ไม่จำเป็นต้องใช้ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้ออื่นๆอีก และไม่จำเป็นต้องปิดแผล หรือสามารถปิดแผลได้ตามต้องการ

### การเก็บรักษา

เก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง หลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดโดยตรง