

ไฮโปคลอรัส Hypochlorous



ใช้ทำความสะอาดและเพิ่มความชุ่มชื้นให้บาดแผล ไม่มีพิษต่อเซลล์ เหมาะกับทุกเนื้อเยื่อ รวมถึงเนื้อเยื่อที่บอบบาง

ป้องกันการแพร่กระจายของแบคทีเรีย Gram+, Gram-, MRSA, ORSA, VRSA, VRE, ไวรัส, เชื้อรา และสปอร์

ส่วนประกอบ: Water, Sodium chloride, hypochlorous acid, sodium hypochlorite

ข้อบ่งชี้ในการใช้งาน



- แผลเรื้อรังทุกชนิด เช่น แผลเบาหวานที่เท้า แผลกดทับ แผลเรื้อรังที่ขา เป็นต้น
- แผลบาดเจ็บเฉียบพลันทุกชนิด แผลถูกกัด แผลฉีกขาด แผลลอก
- แผลผ่าตัด (ระหว่างผ่าตัดและหลังผ่าตัด)
- แผลที่ลึกถึงกระดูกอ่อน หรือกระดูก
- แผลไฟไหม้จนถึงระดับ 2
- แผลจากการได้รับรังสีรักษา
- การบาดเจ็บของเนื้อเยื่ออ่อน
- ใช้ในการ Lavage

วิธีการใช้งาน



ฉีดล้างแผล



เทลง **Sterile gauze** ให้ชุ่ม ปิดไว้ที่แผล 5 นาที



ปิดแผลด้วยแผ่นปิดแผล

ใช้งานได้นานถึง 90 วัน สำหรับชนิดเจล และ 60 วัน สำหรับชนิดสารละลาย หลังเปิดผลิตภัณฑ์แล้ว

"กรดไฮโปคลอรัส" คือสารชนิดเดียวกับกับสารที่เม็ดเลือดขาวสร้างขึ้นตามกระบวนการธรรมชาติเพื่อกำจัดเชื้อโรค จึงไม่ใช่สารแปลกปลอม มีความปลอดภัยสูง และไม่เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อ

Find out more at www.molnlycke.com

