



multi Finger Splint

วิธีวัดไซส์



วัดความยาวนิ้ว
แล้วนำมาเทียบกับตาราง

ตารางขนาดของอุปกรณ์ multi Finger Splint

เบอร์	ขนาดความยาวของนิ้ว
1	ไม่เกิน 6 ซม.
2	6 - 7.5 ซม.
3	7.5 - 10 ซม.



• No.1
5 cm




• No.2
6 cm




• No.3
7 cm

วิธีใส่อุปกรณ์

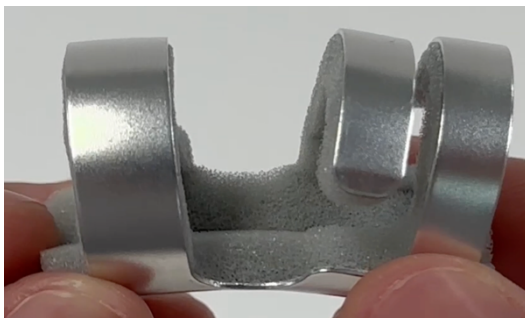

1. ถากตัวล๊อคออก

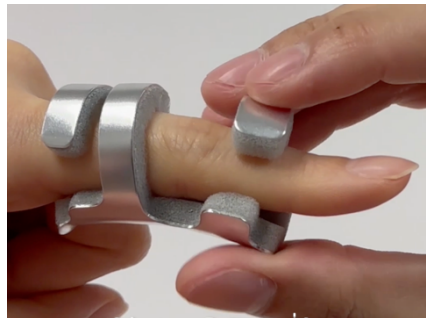

2. สวมอุปกรณ์บริเวณที่ต้องการ




3. ปิดตัวล๊อคอุปกรณ์ให้กระชับพอดี
กับนิ้ว ไม่แน่นหรือหลวมจนเกินไป

*หมายเหตุ : กรณีที่ไม่ต้องการให้คนไข้อยู่ดอดออก ให้พันทับด้วย EB หรือ Co-Band

วิธีถอดอุปกรณ์



1. ถากตัวล๊อคออก

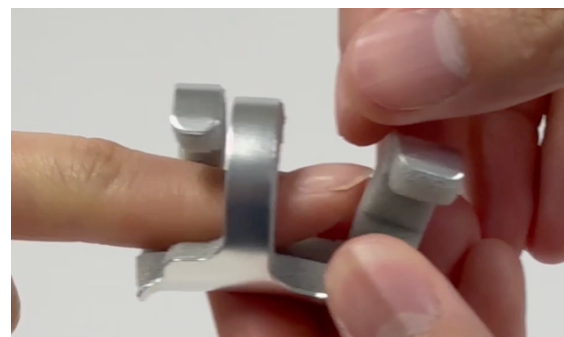

2. นำอุปกรณ์ออกจากนิ้ว

คำเตือนและข้อควรระวัง

1. SOS Plus® Multi Finger Splint ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในกิจกรรมใดๆ ในน้ำ ดังนั้นระหว่างการอาบน้ำหรือกิจกรรมใดๆ ที่เปียกแนะนำให้สวมถุงมือหรือวัสดุใดๆ ที่จะช่วยกันน้ำได้
2. ควรเปลี่ยนเฟือกนิ้วลูมิเนียมใหม่ตามระยะเวลาที่แพทย์กำหนด

วิธีการทำความสะอาด

ถ้ามีคราบสกปรกที่เฟือกนิ้ว ให้ล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสบู่อ่อน ผึ่งให้แห้ง ห้ามใช้เครื่องเป่าความร้อนหรือตากแดดเด็ดขาด

