

(แบบเดิม)

ปรับปรุงครั้งที่1

ใช้เทปแต่งแผลชนิดใส (Transpore) ในการยึดติด EVD กับเสาน้ำเกลือ

อุปกรณ์

ปรับปรุงครั้งที่2

ใช้ที่แขวนneckประสงค์เป็นที่ยึดระดับจุดหยดน้ำไขสัน และใช้กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 50 ml มาตัดเป็นที่ยึด EVD

อุปกรณ์

1. ที่แขวนneckประสงค์ รับน้ำหนักได้มากที่สุด 5 kg ราคา 4-12 บาท/ชิ้น
2. กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 50 มิลลิลิตร ราคาประมาณ 18 บาท/ชิ้น



ที่แขวนneckประสงค์



กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 50 ml


วิธีทำ

1. นำที่แขวนneckประสงค์มาติดตั้งกับเสาน้ำเกลือ
2. นำกระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 50 ml มาตัดเอาหัวท้ายออกแล้วผ่า ดังรูป
3. นำ ข้อ1 และ2 มาประกอบกัน



กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 50 ml ที่ตัดแล้ว

รูปตัวอย่างการใช้งานจริง

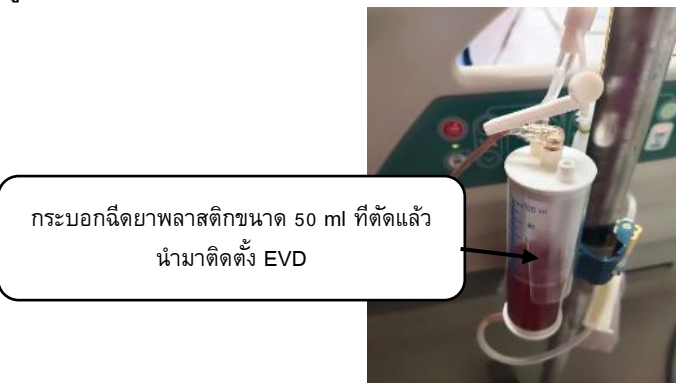

(แบบใหม่)

ปรับปรุงครั้งที่3

ใช้ขวดน้ำเกลือสะอาดแทนกระบอกฉีดยาพลาสติก



อุปกรณ์

1. ที่แขวนneckประสงค์ รับน้ำหนักได้มากที่สุด 5 kg ราคา 4-12 บาท/ชิ้น
2. ขวดน้ำเกลือสะอาดเหลือใช้ในหอผู้ป่วย

วิธีทำ

1. นำที่แขวนneckประสงค์ มาติดตั้งกับเสาน้ำเกลือ
2. นำขวดน้ำเกลือสะอาดมาตัด ดังรูป
3. นำ ข้อ1 และ2 มาประกอบกัน

รูปตัวอย่างการใช้งานจริง

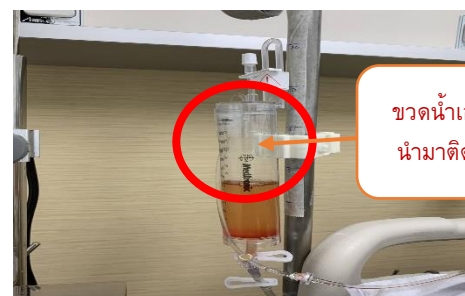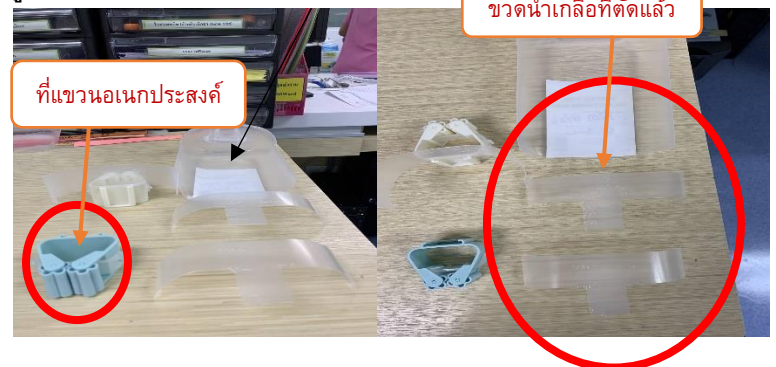

มาตรฐานการใช้งานอุปกรณ์ตั้งระดับจุดหยดน้ำไขสันหลัง

1. ประเมินความจำเป็นในการคาท่อระบายน้ำไขสันหลังออกจากโพรงสมอง (External ventricular drain หรือ EVD) ร่วมกับแพทย์ โดยพยาบาลผู้ดูแลทุกเวร
2. สังเกตการอุดตันของ EVD, สายไม่หักพับ, มีการกระเพื่อมของ CSF (Fluctuation), ไม่มี CSF Leakage และสาย Ventriculostomy ไม่เลื่อนหลุด
3. บันทึก และสังเกตระดับจุดหยดของสาย Ventriculostomy สี และปริมาณน้ำไขสันหลัง (CSF) ทุกครั้งที่เข้าทำกิจกรรมการพยาบาล
4. จัดทำนอนศีรษะสูงตามแผนการรักษา
5. ตั้งระดับจุดหยดหรือจุดโค้งของสาย Ventriculostomy อยู่เหนือหูตามแผนการรักษา และติดป้ายหัวเตียง
6. Clamp สาย EVD เมื่อมีกิจกรรมที่ต้องกระทำต่อผู้ป่วยหรือเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
7. เมื่อผู้ป่วยถอดสาย Ventriculostomy ให้นำอุปกรณ์ตั้งระดับจุดหยดน้ำไขสันหลังเช็ดทำความสะอาด และเก็บในชั้นที่จัดไว้