

INSTALLATION GUIDE

คู่มือภาษาไทย

TOUCH TABLETOP



MOVING FROM PASSIVE TO EXPERIENTIAL LEARNING

CUSTOMER SUPPORT

T. + 351 239 090 850 *

E. support@bodyinteract.com

*During working hours:


Monday to Friday, 9am - 1pm, 2pm - 6pm

WET - Western European Time

BODYINTERACT.COM

BODY INTERACT™
CLINICAL REASONING EDUCATION

01 PREPARE THE TABLETOP

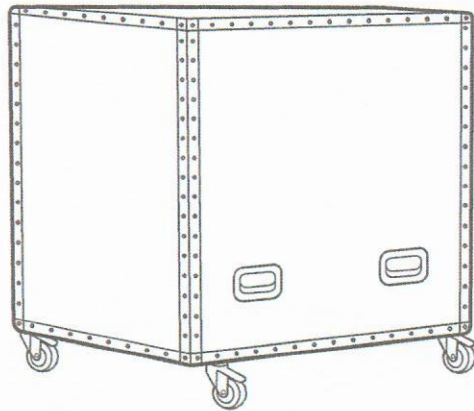

นำเครื่องออกจากกล่องสำหรับเคลื่อนย้าย
และทำการเสียบปลั๊กเพื่อเริ่มใช้งาน



02 SET-UP




Port USB HDMI Port LAN สวิตช์เปิดเครื่อง

03 SET-UP

c ตรวจสอบระบบเสียงว่าเสียงออกที่ลำโพงหรือไม่ โดยการเลือกที่รูปลำโพงบริเวณมุมขวาล่าง แล้วกดที่รูปลำโพง หรือทำการเปิดไฟล์เสียง

For better signal of the remote control please aim it to the tabletop's screen.

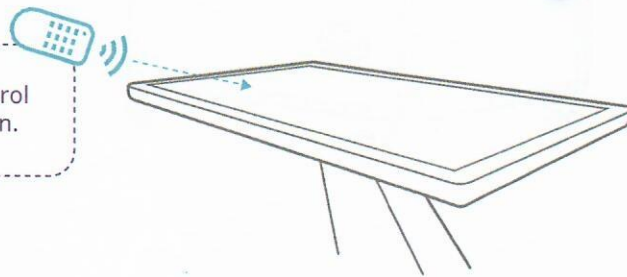

04 START APPLICATION

a กดเลือกไอคอนโปรแกรมดังกล่าว บริเวณหน้าจอ หรือ Start bar



b เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้วจะพบหน้าต่างดังกล่าว ให้กดตรงคำว่า BODY INTERACT

05 LOG IN


ผู้ใช้จะต้องทำการ Log in ทุกๆ 30 วัน



ระบบจะมีการตรวจสอบการ Login ทุกๆ 30 วัน
ให้ทำการเชื่อมต่อ Internet และใส่ Email และ
password โดย Email และ Password จะอยู่ที่ Folder
บริเวณหน้า Desktop


06 SETTING MENU

หน้าจอ Setting ใช้สำหรับการปรับค่าหน่วยวัดต่างๆ ระดับเสียงต่างๆ ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับค่าได้

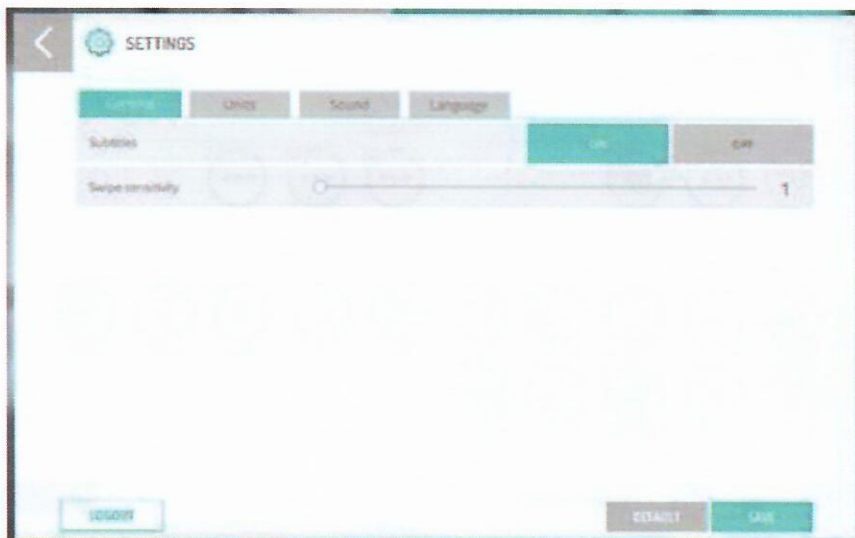


07 SETTINGS MENU (GEAR ICON AND FILTER)

เมื่อเข้าสู่โปรแกรมแล้ว จะพบหน้าหลักดังนี้

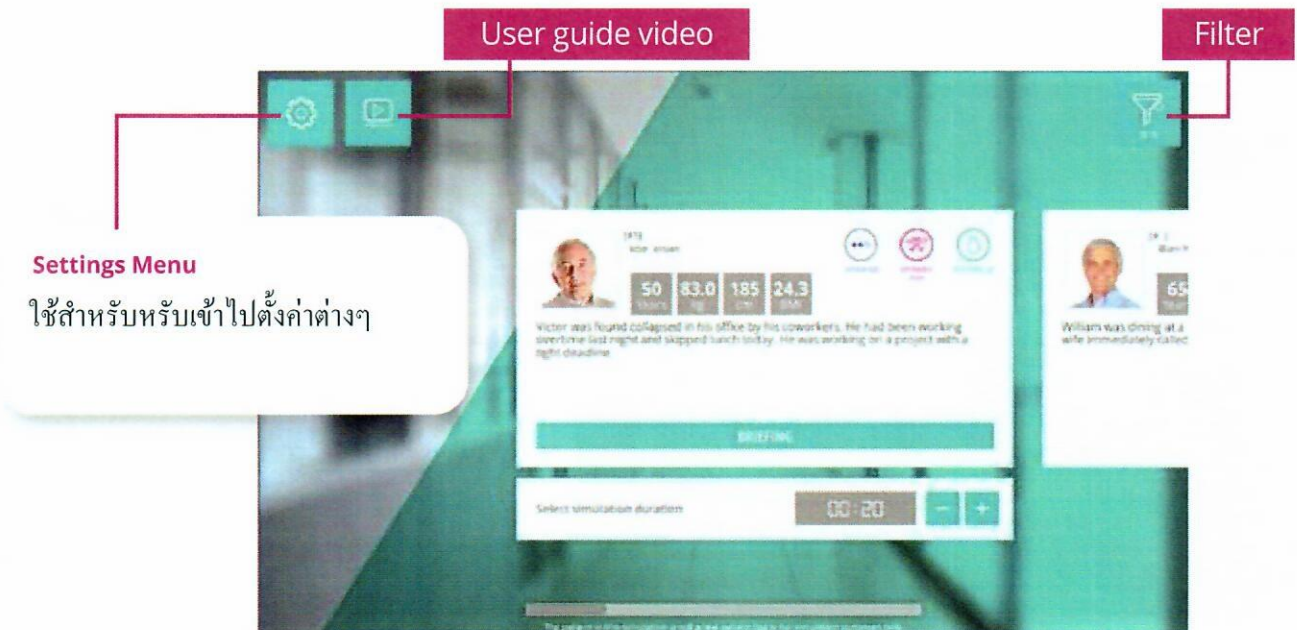


08 SETTINGS MENU (FILTER)

หน้าจอ Filter ใช้สำหรับการค้นหาเคสให้รวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเลือกค้นหาได้ตาม รูปแบบของการจำลองสถานการณ์ ระดับความยาก และกลุ่มของโรคต่างๆ

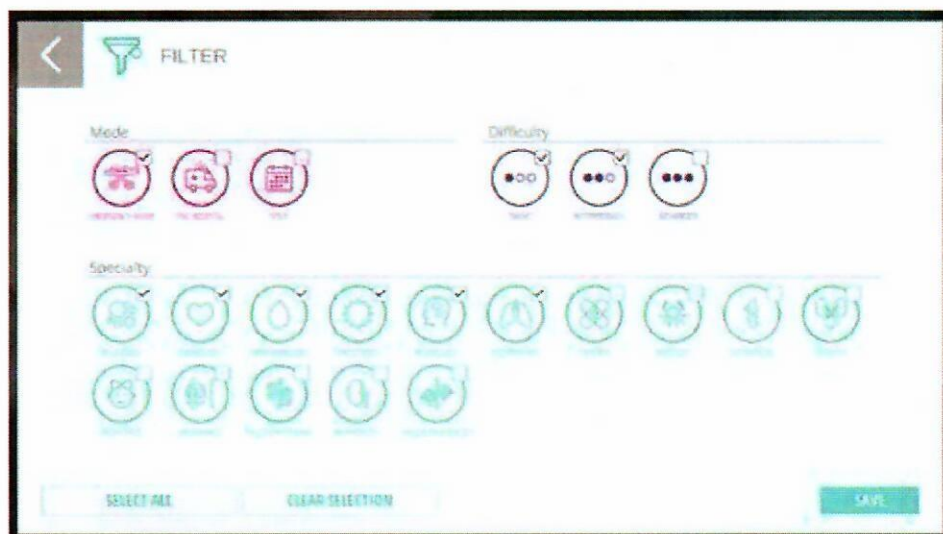


09 CASE MENU

ในหน้าจอแสดงเคสผู้ป่วยจำลอง จะแสดงระดับความยาก รูปแบบการจำลองสถานการณ์ และกลุ่มของโรค โดยจะมีรายละเอียดผู้ป่วยแสดงอยู่เพื่อการวิเคราะห์ในเบื้องต้น และสามารถตั้งเวลาที่จะจำลองสถานการณ์ได้

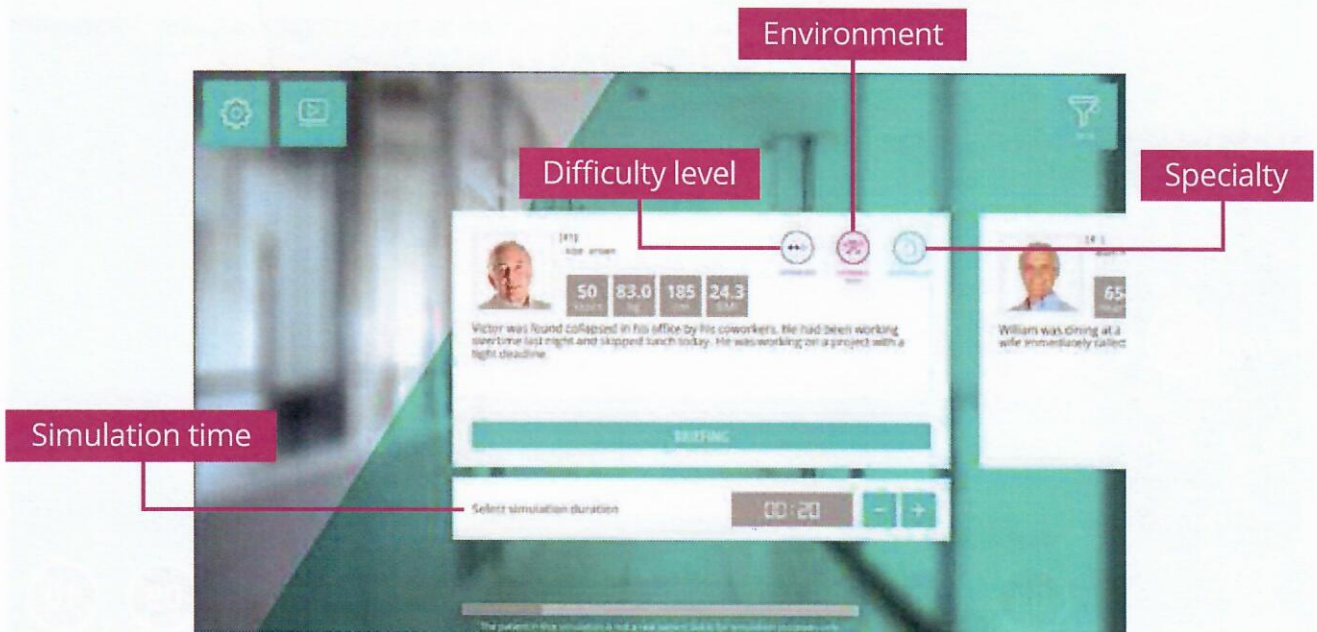


10 BRIEFING

หน้าจอ Briefing จะกล่าวถึงประวัติและอาการของผู้ป่วยจำลอง เมื่อศึกษาแล้วให้กด Start

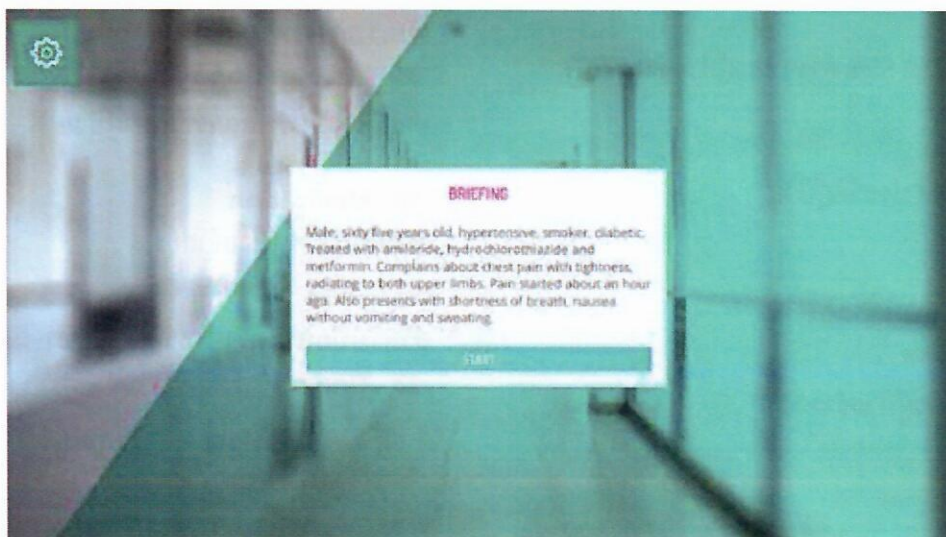

11 SIMULATION OVERVIEW AND TOOLS

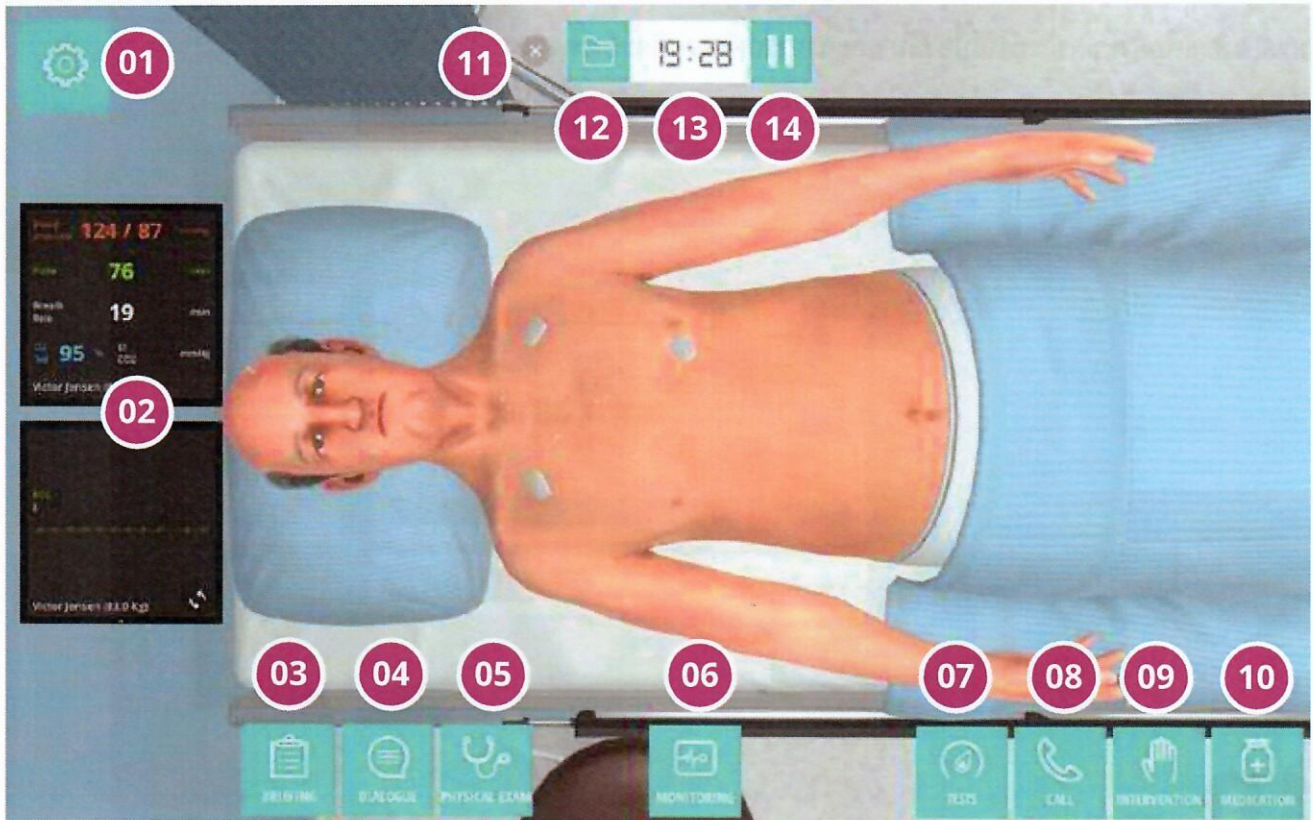

01 - Settings Menu (Gear icon)

สำหรับเข้าไปเมนูปรับตั้งค่าต่างๆ หรือเมนู Briefing

02 - Monitors

สำหรับแสดงค่า Vital Sign ต่างๆของผู้ป่วยจำลอง

03 - Briefing

สำหรับทำการ Brief ประวัติผู้ป่วย

04 - Dialogue

สำหรับซักประวัติผู้ป่วยจำลอง

05 - Physical exam

สำหรับตรวจร่างกายผู้ป่วยจำลอง

06 - Monitoring

สำหรับตรวจดูค่า Vital Sign ของผู้ป่วย

07 - Tests

สำหรับตรวจค่าผล LAB หรือ Image

08 - Call

สำหรับแจ้งส่งต่อไปยังหน่วยอื่น

09 - Intervention

สำหรับทำการหัตถการรักษาผู้ป่วย

10 - Medication

สำหรับให้ยาผู้ป่วยจำลอง

11 - Close

สำหรับปิดหน้าต่างประวัติการรักษา

13 - Timer


แสดงเวลาที่เหลืออยู่

14 - Play/Pause

สำหรับเริ่มและพักการจำลองสถานการณ์


12 DIAGNOSIS

เมื่อจบการจำลองสถานการณ์ ต้องตอบคำถามอาการของผู้ป่วย

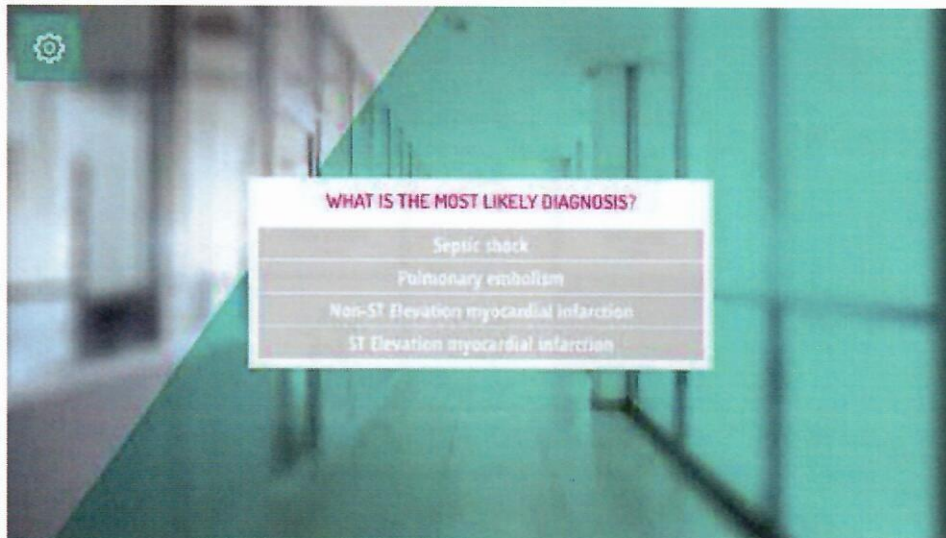

13 DEBRIEFING

สำหรับแสดงผลการฝึกซึ่งสามารถเข้าไปดูแต่ละ Report ได้

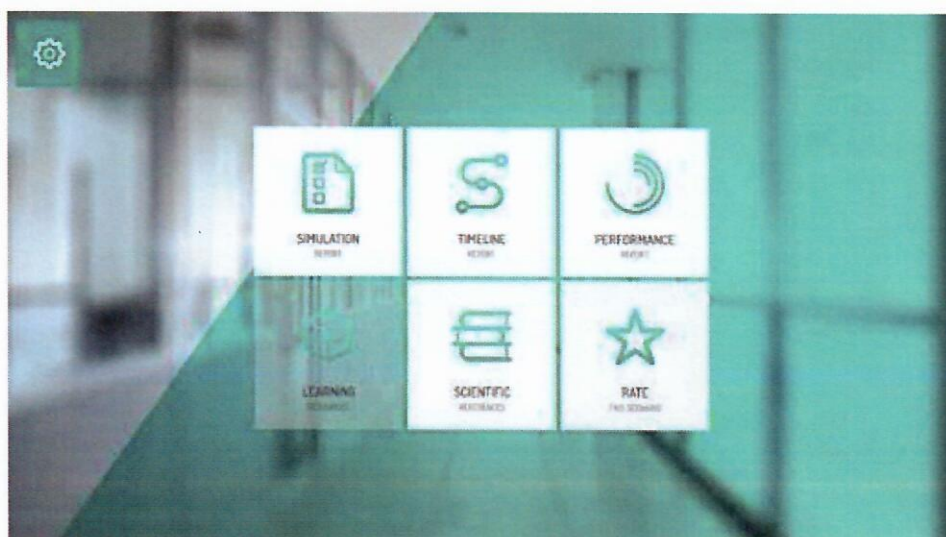

14 REPEAT CASE

สำหรับฝึกการจำลองสถานการณ์เดิมอีกครั้ง




15 DEBRIEFING

สำหรับแสดงผลการฝึกซึ่งสามารถเข้าไปดูแต่ละ Report ได้




16 SIMULATION REPORT

แสดงผลการฝึกและตอบคำถามหลังการฝึก

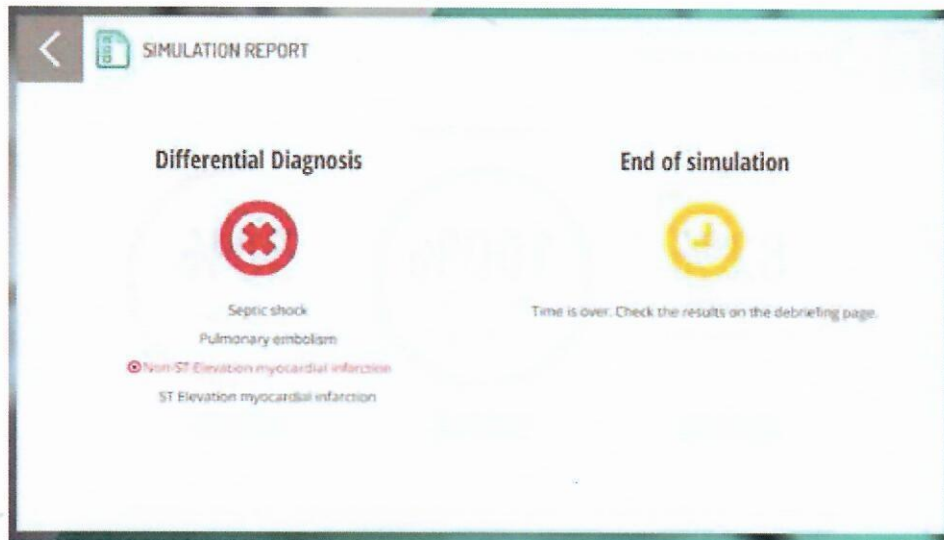

17 TIMELINE REPORT

แสดงการกระทำทุกอย่างในการฝึกจำลองสถานการณ์

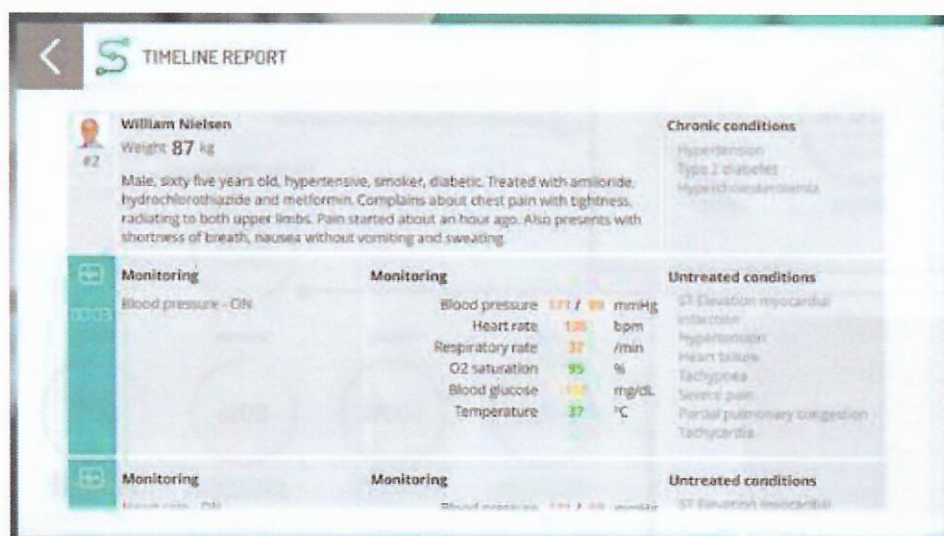


18 PERFORMANCE REPORT LEVEL 1

แสดงคะแนนของการฝึก โดยอิงจากสิ่งที่ทำในการฝึก



19 PERFORMANCE REPORT LEVEL 2



สามารถเข้าไปดูรายละเอียดในส่วนต่างๆเพิ่มได้

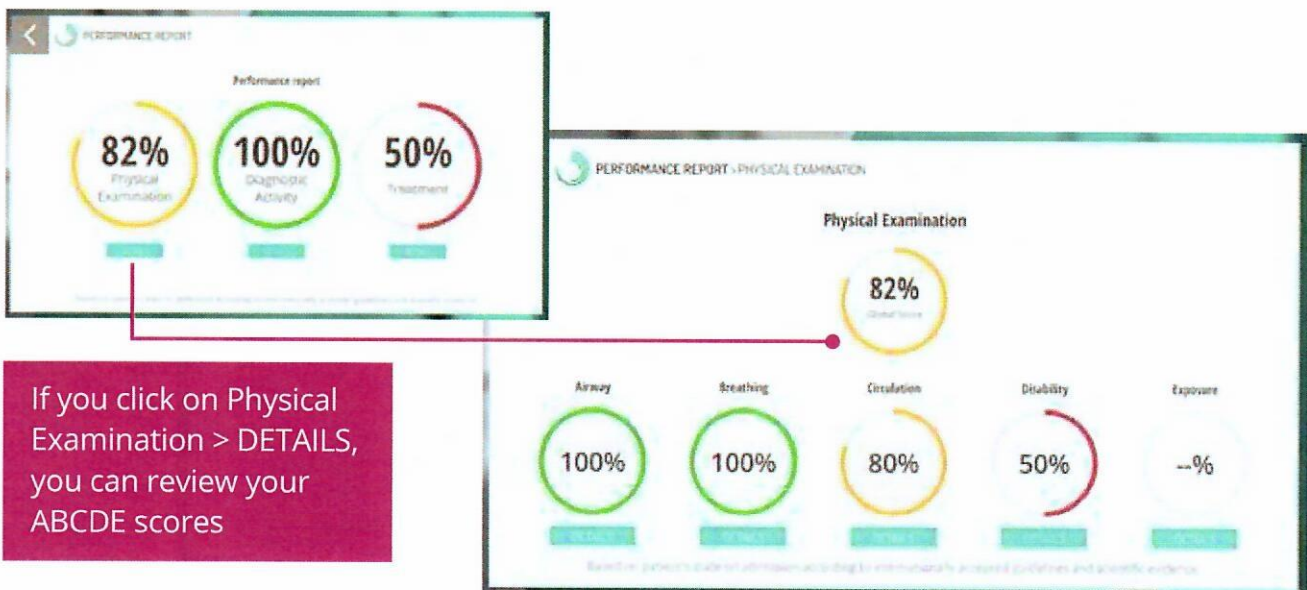

If you click on Physical Examination > DETAILS, you can review your ABCDE scores

20 PERFORMANCE REPORT LEVEL 3


ดูรายละเอียดสิ่งที่ได้ทำ ไม่ได้ทำ หรือทำผิด ในการจำลองสถานการณ์

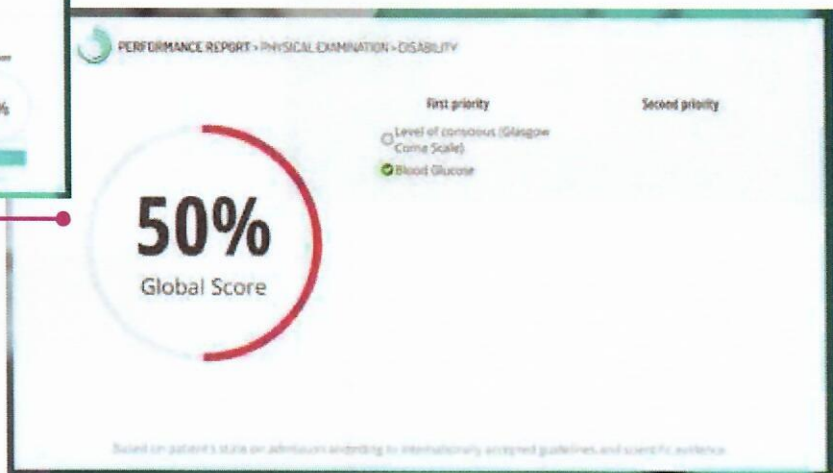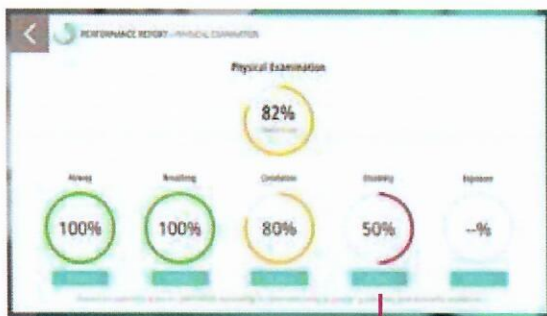

If you click on Disability > DETAILS, you can review what you have missed


21 SCIENTIFIC REFERENCES

แสดง References ที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์

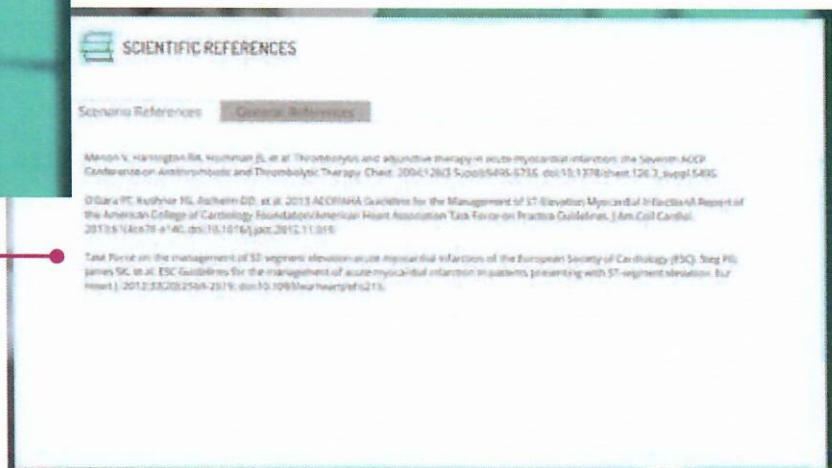

22 RATE THIS SCENARIO

ระดับความยากของเคส

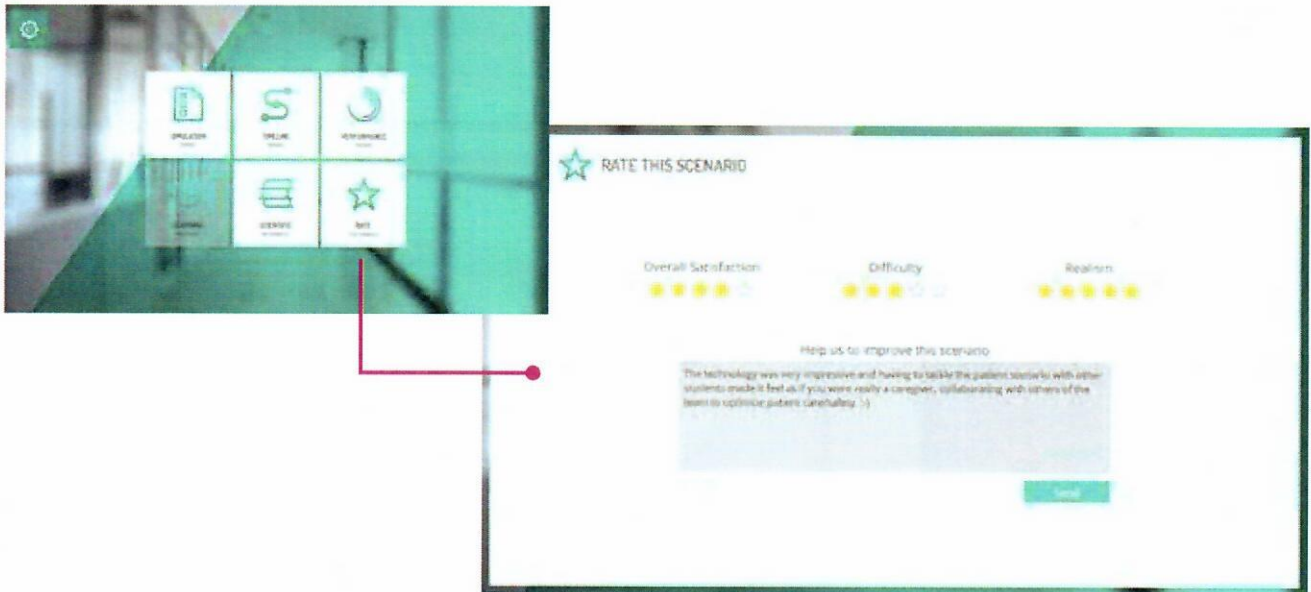

CUSTOMER SUPPORT

T. + 351 239 090 850 *

E. support@bodyinteract.com

*During working hours:
Monday to Friday, 9am - 1pm, 2pm - 6pm
WET - Western European Time

BODYINTERACT.COM